
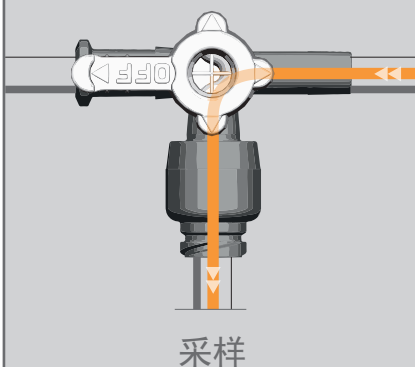
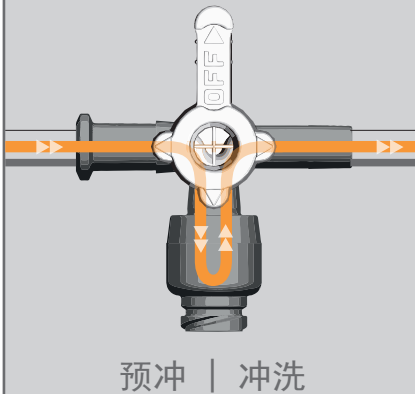


位置

◁ 压力监护侧 患者侧 ▷

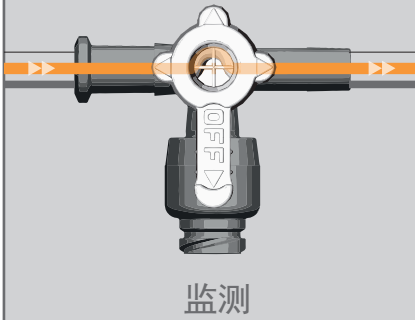


不得用于所有的关闭位


采血指南

闭合式系统


- A 将手柄转到冲洗位.
- B 使用在线注射器进行预采样.

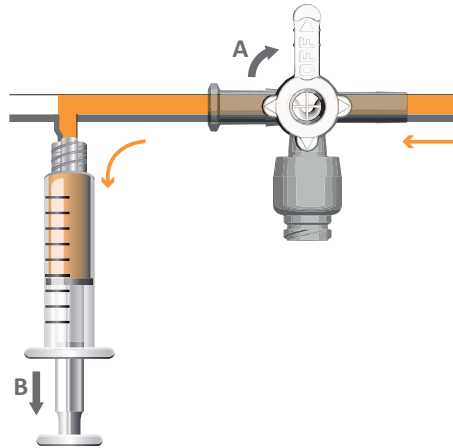


- C 将手柄转到采样位.
- D 连接采样注射器并抽取血样.

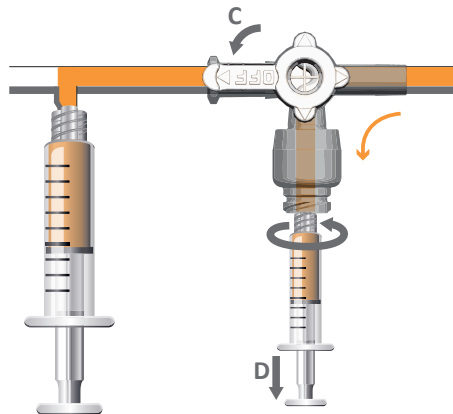


- E 取下采样注射器.

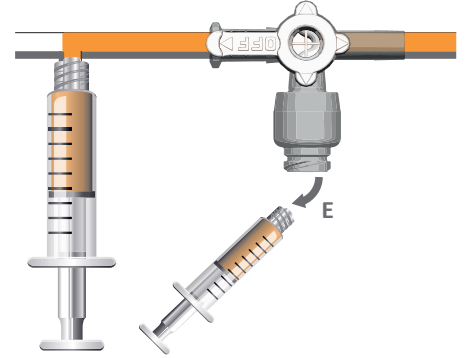

- F 将手柄转到冲洗位.
- G 将在线注射器里的液体回推.

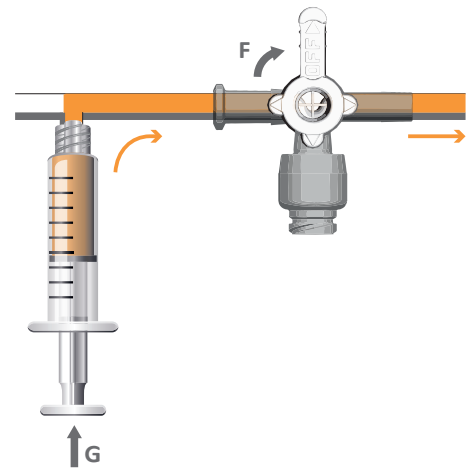

- H 冲洗管路.
- I 将手柄转到监测位.

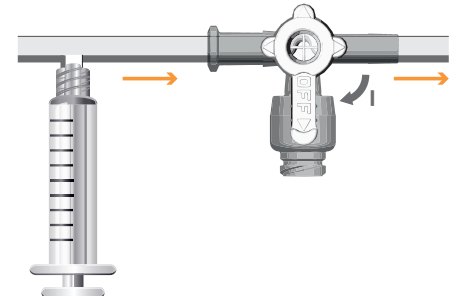

- 仅适合与标准鲁尔接头配合使用
- 顺时针旋转采样注射器，将其插入阀门并锁紧。
- ✗ 请勿使用针头与阀门连接。
- 无需使用护帽，插塞，“肝素帽”，插管或任何其它附加组件来闭合阀门。

重要说明: Marvelous™ 的这些指导说明仅供参考, “无意于” 给出任何医疗或手术的具体说明或建议, 请勿作此看待. 使用本产品时应采取的合适程序和技术应由具体的医生来确定. 处方产品.